

# Гарантийный талон на ремонт

Дата продажи \_\_\_\_\_

Печать торгового представителя

МП

Подпись продавца \_\_\_\_\_



Если сетевой адаптер AD-155 входит в комплект поставки измерителя артериального давления, гарантийный срок на адаптер исчисляется с даты покупки прибора



ХРАНЕНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ



## Адрес гарантийной мастерской:

Москва, ул. Бехтерева д.27  
м. Кантемировская  
Тел. (495) 325-45-63

GC\_AD155\_RU\_4214

## Использовать только для измерителей давления TM Microlife и TM B.Well

### Правила эксплуатации

1. Подключите штекер блока питания к гнезду, расположенному на боковой стенке прибора, при этом питание прибора от батареек автоматически отключится.
2. Вставьте штепсельную вилку блока питания в розетку электросети.
3. После окончания работы отключите блок питания от сети.

### Требования безопасности

Блок питания по степени защиты от поражения электрическим током соответствует приборам класса II по ГОСТ 12.2.06-87. Запрещается включать блок питания в сеть при снятой крышке корпуса. Не оставлять включенный прибор без присмотра.

### Сведения о соответствии

Источник электропитания соответствует, в т.ч. по безопасности, требованиям технических условий ТУ 11-99 БП №ЭКМО.436230.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

### Гарантийные обязательства

На блок питания предоставляется гарантия 6 месяцев с даты покупки. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного обращения, несчастных случаях, несоблюдения руководства по эксплуатации или изменений, внесенных в блок питания третьими лицами.

Гарантия действует только в случае предъявления гарантийного талона, заполненного сотрудниками торговой организации.

### Технические характеристики

Входное напряжение, В	100-240	Масса, кг не более	0,08
Выходное напряжение	6В, 0,6А	Длина соединительного шнура, м	1,7
Габаритные размеры	55x67x24	Срок службы прибора: не менее	10 лет

**Дата изготовления указана на приборе:** первые две цифры – неделя производства, вторые две цифры – последние две цифры года.